

Dream® FIT




EFEKT CHŁODZĄCY / EFEKT ROZGRZEWAJĄCY



- ✓ WIELOKROTNEGO UŻYTKU
- ✓ ŁATWE DO ZAŁOŻENIA
- ✓ ELASTYCZNE
- ✓ UNIWERSALNE

Stosuj, gdy efekt ciepła lub zimna przynosi uczucie komfortu i odprężenia.

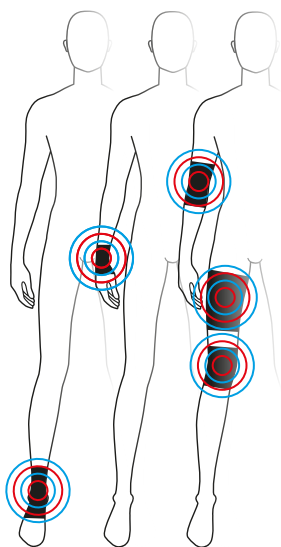

DOSTĘPNE OPASKI:

- Kostka
- Nadgarstek
- Kolano
- Łokieć
- Udo



EFEKT CHŁODZĄCY

Wyjmij opaskę z opakowania, pozostawiając ją w ochronnym woreczku plastikowym. Umieść w zamrażarce na minimum 2 godziny. Po osiągnięciu odpowiednio niskiej temperatury wyjmij opaskę i nałóż na wybraną partię ciała. Opaska nie powinna być zbyt zimna, jej działanie musi zapewniać komfort i przyjemne odczucie na skórze. Zakładaj opaskę od szerszej (niezszywanej) strony. Chłodzący efekt utrzymuje się przez około 20 minut. Między użyciami opaskę można przechowywać w zamrażarce, w woreczku ochronnym. Przed założeniem upewnij się, że wewnętrzna warstwa nie zawiera kryształków lodu – w takim przypadku nie używaj opaski.

EFEKT ROZGRZEWAJĄCY

Wyjmij opaskę z plastikowego woreczka ochronnego i podgrzej w kuchence mikrofalowej (średnia moc 600–800 W) przez maksymalnie 20 sekund. Sprawdź temperaturę i w razie potrzeby podgrzewaj dodatkowo do 10 sekund, aż do uzyskania odpowiedniego ciepła. Opaska nie powinna być zbyt gorąca. Powinna zapewniać przyjemne uczucie ciepła na skórze. Nałóż na wybrany obszar ciała, zakładając od szerszej strony. Efekt rozgrzewający utrzymuje się przez około 15 minut. Po użyciu pozostaw opaskę do ostygnięcia do temperatury pokojowej i schowaj do woreczka ochronnego aż do kolejnego użycia.

Dream® FIT

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Opaska może chłonać wodę i pęcznieć. Jeśli zamoknie, pozostaw ją do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie susz w suszarce. Nie stosuj opaski na skórę zakażoną ani na otwarte rany. Zawsze przechowuj opaskę w plastikowym woreczku. W przypadku przedostania się żelu na skórę, przemyj ją wodą z mydłem. W razie przypadkowego połknięcia

żelu natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie prać i nie prasować.

Przeznaczenie: Produkt przeznaczony jest do celów relaksacyjnych i poprawy komfortu skóry. Nie jest wyrobem medycznym.

KOLANO | ŁOKIEĆ | UDO

TABELA ROZMIARÓW

WZROST	MASA CIAŁA	KOLANO	ŁOKIEĆ	UDO
< 152 cm	< 45 Kg	S	N/A	M
152 - 165 cm	45 - 73 Kg	M	S	L
	73 - 86 Kg	M	M	L
165 - 170 cm	59 - 77 Kg	M	S	L
	78 - 86 Kg	M	S	XL
	87 - 95 Kg	L	M	XL
170 - 175 cm	68 - 79 Kg	M	S	XL
	80 - 104 Kg	L	M	XL
175 - 180 cm	77 - 86 Kg	M	S	XL
	86 - 104 Kg	L	M	XL
	105 - 113 Kg	XL	L	N/A
180 - 185 cm	86 - 95 Kg	L	M	XL
	96 - 104 Kg	XL	L	N/A
185 - 193 cm	95 - 113 Kg	XL	L	N/A

KOSTKA

TABELA ROZMIARÓW

ROZMIAR	M	L
Obwód kostki	17 - 25,4 cm	23 - 33 cm
♂ Rozmiar stopy	37 - 41,5	> 41
♀ Rozmiar stopy	36,5 - 39,5	> 39,5

NADGARSTEK

TABELA ROZMIARÓW

ROZMIAR	S	M	L
Obwód nadgarstka	13,5 - 17 cm	17 - 21 cm	> 21 cm

