

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ostrzeżenia i przeciwwskazania

Urządzenie Activforce 2 NIE POWINNO BYĆ UŻYWANE, gdy:

Użytkownik i/lub osoba poddawana badaniu ma alergię na silikon lub tworzywa sztuczne.

Skóra stykająca się z urządzeniem lub podkładką jest uszkodzona, podrażniona lub w inny przejawia inne dysfunkcje.

Urządzenie lub dołączona podkładka są w widoczny sposób uszkodzone.

Urządzenie znajduje się w środowisku o wysokiej temperaturze, wilgotności lub ciśnieniu.

Zastrzeżenia te służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i nie mają na celu ani nie powinny być traktowane jako zamiennik profesjonalnej porady medycznej. Nie należy wykorzystywać informacji zawartych na tej stronie do diagnozowania ani leczenia jakichkolwiek schorzeń medycznych lub zdrowotnych. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia problemu medycznego należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Informacje na tej stronie są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń ani gwarancji.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie Activforce 2 nie łączy się z mobilną aplikacją, upewnij się, że aplikacja ma uprawnienia do połączenia Bluetooth na urządzeniu mobilnym. W przypadku niektórych urządzeń aplikacja towarzysząca Activforce 2 wymaga również uprawnień do lokalizacji. Jeśli problemy z łącznością nadal występują, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wymienić baterię, lub upewnij się, że urządzenie mobilne jest obsługiwane.

Aplikacja mobilna Activforce 2 wykonuje operację tarowania automatycznie przed każdym pomiarem, podczas fazy kalibracji. Ponadto urządzenie można również wytarować ręcznie. Aby wytarować urządzenie, wybierz opcję „Calibrate Your Device” (Skalibruj urządzenie) z menu ustawień aplikacji mobilnej Activforce 2.

Aby wykonać twardy reset urządzenia, wyjmij baterię i włóż ją ponownie po 10 sekundach. Bateria i wymienne podkładki są jedynymi elementami, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

W celu uzyskania dalszej pomocy, złożenia reklamacji lub przesłania komentarzy prosimy o kontakt pod adresem info@strefaregeneracji.pl.

Bezpieczeństwo

Urządzenie Activforce 2 ma certyfikat zgodności ze wszystkimi wymaganymi normami i przepisami bezpieczeństwa, w tym dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i materiałów niebezpiecznych, na wszystkich terytoriach, na których jest dystrybuowane. Obejmuje to następujące normy: IEC 60601-1 (bezpieczeństwo) i EN 60601-1-2 (EMC).

Urządzenie Activforce 2 nie jest wodoodporne i nie powinno być zanurzane w wodzie lub innych płynach.

Podobnie jak wiele urządzeń elektronicznych urządzenie Activforce 2 zawiera materiały łatwopalne i nie powinno być wystawiane na działanie płomieni słonecznych lub innych źródeł nadmiernego ciepła.

Żywotność

Żywotność urządzenia Activforce 2 wynosi co najmniej 30 000 cykli lub pomiarów siły.

Korzystanie z urządzenia ActivForce 2

Pomiar siły

Nie należy przykładać siły pod kątem lub w kierunku poprzecznym (równoległym) do urządzenia.

Nie należy przykładać siły na niebieskim pasku urządzenia lub w jego pobliżu.

Nie należy przykładać siły podczas trwającego trzy sekundy okresu kalibracji przed rozpoczęciem pomiaru siły.

Nie należy poruszać ani potrząsać urządzeniem podczas pomiaru siły.

Pomiar zakresu ruchu

Nie należy obracać urządzenia Activforce 2 w wielu osiach podczas pomiaru.

Nie należy przesuwając urządzenie Activforce 2 w wielu płaszczyznach ruchu podczas pomiaru.

Nie należy obracać urządzenia podczas krótkiego okresu kalibracji, zanim aplikacja rozpocznie pomiar zakresu ruchu.

Bezpieczeństwo aplikacji

Należy zalogować się i wylogować z aplikacji lub korzystać z funkcji bezpieczeństwa na urządzeniu mobilnym, aby zadbać o prywatność danych. Dane w aplikacji są zaszyfrowane i dostępne tylko po podaniu nazwy użytkownika i hasła.

NIE należy udostępniać innym osobom swojej nazwy użytkownika oraz hasła. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących prywatności danych.

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji i chorób, urządzenie Activforce 2 i podkładkę należy dezynfekować przed każdym użyciem. Zewnętrzne powierzchnie urządzenia Activforce 2, w tym zaokrąglona podkładka i miękki, łukowaty, silikonowy rękaw podkładki, można przecierać w temperaturze pokojowej miękką szmatką i roztworem czyszczącym składającym się z 70% alkoholu izopropylowego i wody. Po zastosowaniu roztwór czyszczący należy pozostawić do całkowitego odparowania.

Roztwór czyszczący z 1% podchlorynu i wody (10 000 ppm) również może być używany do wycierania urządzenia, podkładek i silikonowych rękawów. Można również stosować antybakteryjne środki do dezynfekcji rąk, takie jak chusteczki nawilżane środkiem bezalkoholowym lub żele do rąk na bazie alkoholu. Wszelkie pozostałości tych środków należy wytrzeć miękką, suchą i czystą chusteczką lub ręcznikiem.

Wymiana baterii

Urządzenie Activforce 2 jest dostarczane ze standardową baterią AAA, która działa od sześciu do dwunastu miesięcy w zależności od użytkowania i warunków środowiskowych. Aby wymienić baterię, należy wykonać czynności:

1. Zaopatrzyć się w nową baterię AAA i płaski śrubokręt o średniej wielkości.
2. Przytrzymać urządzenie Activforce2 z mechanizmem mocowania podkładki skierowanym do góry. Logo Activforce NIE powinno być widoczne.
3. Włożyć końcówkę śrubokręta w mały otwór w pobliżu przycisku zasilania i delikatnie przekręcić śrubokręt, aż będzie słyszalne kliknięcie, a dolna pokrywa obudowy lekko się otworzy. Spowoduje to otwarcie pierwszego z pięciu zatrzasków na dolnej pokrywie.
4. Delikatnie przesuwając śrubokręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara wzdłuż krawędzi urządzenia Activforce 2, trzymając końcówkę wewnątrz szczeliny między pokrywą a urządzeniem, aż znajdzie się około półtora cala (4 cm) od oryginalnego otworu w pobliżu przycisku zasilania. Zatrzymać przesuwanie i delikatnie obrócić śrubokręt, aż słyszalne będzie kliknięcie. Kontynuować przesuwanie śrubokręta wokół krawędzi z końcówką wewnątrz szczeliny, zatrzymując się co półtora cala (4 cm), aby obrócić śrubokręt w celu otwarcia zatrzasków dolnej pokrywy. Dolną pokrywę można zdjąć po otwarciu czterech lub pięciu zatrzasków.