

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Dokument dotyczy pistoletów do masażu perkusyjnego AVACR7 z serii PRO Physio: PRO Physio, PRO Physio PRO i PRO Physio PRO Max, a także kompatybilnych końcówek masujących, końcówki grzewczej do modeli PRO Physio PRO / PRO Physio PRO Max oraz stacji ładującej Charging Base do tych modeli. Poszczególne urządzenia różnią się amplitudą, sposobem ładowania, czasem pracy, liczbą ustawień i budową. Zawsze należy stosować instrukcję właściwą dla posiadanego modelu.

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia i wszystkich używanych akcesoriów oraz zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie jest przeznaczone do masażu mięśni i wspomagania regeneracji po wysiłku. Nie służy do diagnozowania ani leczenia chorób i nie zastępuje konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić obudowę, ruchome ramię, gniazdo końcówki, przewód, ładowarkę, stację ładującą i końcówki. Nie używać elementów pękniętych, zdeformowanych, poluzowanych, przegrzanych lub działających nieprawidłowo.
- Stosować wyłącznie końcówki, przewody, ładowarki i stacje ładujące przeznaczone do danego modelu oraz zalecane przez producenta.
- Kończówkę masującą należy zakładać i zdejmować wyłącznie po wyłączeniu urządzenia. Przed uruchomieniem upewnić się, że została prawidłowo i stabilnie zamocowana.
- Model PRO Physio PRO Max posiada ramię ustawiane w pięciu pozycjach. Pozycję ramienia należy dobrać przed rozpoczęciem masażu; podczas regulacji uważać na palce i nie używać nadmiernej siły.
- Masaż rozpocząć od najniższej intensywności i niewielkiego nacisku. Intensywność zwiększać stopniowo, wyłącznie do poziomu, który pozostaje komfortowy.
- Głowicę należy prowadzić powoli po mięśniu. Nie zatrzymywać jej przez dłuższy czas w jednym miejscu i nie dociskać urządzenia z nadmierną siłą.
- Nie kierować pracującą końcówką na oczy, uszy, głowę, przednią i boczną część szyi, gardło, kręgosłup, kości, stawy, klatkę piersiową, brzuch, nerki, okolice narządów płciowych ani miejsca przebiegu dużych naczyń krwionośnych.
- Nie używać urządzenia na otwartych ranach, oparzeniach, wysypce, infekcjach, świeżych bliznach, krwiakach, silnie obrzękniętych tkankach ani w miejscach z ostrym stanem zapalnym.
- Nie wkładać palców, włosów, odzieży ani innych przedmiotów pomiędzy poruszającą się głowicę a obudowę urządzenia.
- Nie używać masażera podczas snu, prowadzenia pojazdu, obsługi maszyn, kąpieli ani w miejscach, w których utrata kontroli nad urządzeniem może spowodować uraz.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach ani mokrymi rękami. Nie zanurzać masażera, ładowarki, stacji ładującej ani końcówki grzewczej w wodzie lub innych cieczach.
- Urządzenie, końcówki, przewody i elementy opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Dzieci nie powinny używać urządzenia bez bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej.
- W przypadku nietypowego hałasu, zapachu spalenizny, dymu, iskrzenia, nadmiernych wibracji, przegrzewania lub samoczynnego wyłączania należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć urządzenie od zasilania.

Przeciwwskazania

- Nie stosować urządzenia bez konsultacji z lekarzem w przypadku ciąży, wszczepionego rozrusznika serca lub innego aktywnego implantu elektronicznego.

- Nie stosować na obszarach z zakrzepicą, zapaleniem żył, podejrzeniem zakrzepu, znacznymi żylakami albo poważnymi zaburzeniami krążenia.
- Nie stosować w przypadku zaburzeń krzepnięcia krwi, skłonności do krwawień lub przyjmowania leków przeciwkrzepliwych bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować na złamaniach, zwichnięciach, ostrych urazach, naderwaniach, świeżych krwiakach ani w miejscu niedawnego zabiegu chirurgicznego bez zgody lekarza lub fizjoterapeuty.
- Nie stosować w miejscu nowotworu, niewyjaśnionego guza, aktywnej infekcji, ostrego stanu zapalnego ani silnego, niewyjaśnionego bólu.
- Osoby z osteoporozą, neuropatią, cukrzycą, zaburzeniami czucia, chorobami naczyń lub osłabioną skórą powinny skonsultować użycie urządzenia ze specjalistą.
- Końcówki grzewczej nie stosować u osób z zaburzeniami odczuwania temperatury, nietolerancją ciepła, zaburzeniami krążenia, świeżym urazem z obrzękiem ani na skórze podrażnionej lub uszkodzonej.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia lub reakcji organizmu należy zrezygnować z użycia i skonsultować się z lekarzem.

Ograniczenia zastosowania

- Należy dobrać model, końcówkę, prędkość i nacisk do masowanej partii ciała oraz indywidualnej tolerancji użytkownika.
- Modele PRO Physio PRO i PRO Physio PRO Max są wyposażone w inteligentny timer 10-minutowy. Automatyczne zakończenie cyklu nie oznacza, że sesję należy natychmiast powtarzać na tym samym obszarze.
- W przypadku bólu, drętwienia, mrowienia, zawrotów głowy, nudności, osłabienia, wyraźnego zaczerwienienia, obrzęku lub utrzymującego się dyskomfortu należy natychmiast przerwać masaż.
- Nie stosować intensywnego masażu bezpośrednio po urazie ani na tkankach, których stan nie został oceniony przez lekarza lub fizjoterapeutę.
- Masażu nie należy wykonywać na jednej okolicy przez czas dłuższy niż wskazany w instrukcji danego modelu. Należy robić przerwy i obserwować reakcję skóry oraz mięśni.
- Końcówka grzewcza do PRO Physio PRO / PRO Physio PRO Max osiąga temperaturę 42°C albo 50°C. Wyższy poziom należy stosować wyłącznie przy zachowanym prawidłowym czuciu i dobrej tolerancji ciepła.
- Nie pozostawiać włączonej końcówki grzewczej nieruchomo na skórze. Prowadzić ją powoli po mięśniu, stale kontrolując temperaturę i reakcję skóry.
- Końcówka grzewcza przeznaczona do PRO Physio PRO / PRO Physio PRO Max nie jest przeznaczona do modelu PRO Physio. Nie stosować akcesoriów niezgodnych z oznaczeniem kompatybilności.
- Stacja Charging Base jest kompatybilna wyłącznie z modelami PRO Physio PRO i PRO Physio PRO Max. Nie umieszczać na niej modelu PRO Physio ani innych urządzeń.
- Nie używać masażera pod kocem, poduszką lub odzieżą ograniczającą wentylację urządzenia.
- Nie używać jednocześnie z innymi urządzeniami terapeutycznymi w tym samym obszarze ciała bez zgody specjalisty.

- Osoba pomagająca w masażu powinna zachować stabilny chwyt i nie wywierać nacisku, który powoduje ból albo utrudnia swobodne oddychanie użytkownika.

Konserwacja urządzenia

- Przed czyszczeniem, zmianą końcówki, kontrolą lub przechowywaniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki albo stacji ładującej.
- Obudowę masażera należy przecierać miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osuszyć. Nie stosować agresywnych detergentów, rozpuszczalników, wybielaczy ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się wody, potu, kremu lub olejku do otworów wentylacyjnych, gniazda ładowania, mechanizmu głowicy ani elementów regulowanego ramienia.
- Nie używać urządzenia na skórze pokrytej olejkiem lub kremem, jeśli może to spowodować ślizganie się urządzenia lub przedostanie substancji do jego wnętrza.
- Regularnie sprawdzać stabilność mocowania końcówek, stan mechanizmu ruchomego oraz przewodów i złączy. Uszkodzone części należy wymienić przed ponownym użyciem.
- Nie otwierać obudowy, nie demontować akumulatora i nie podejmować samodzielnych napraw. Serwis powinien być wykonywany przez autoryzowany lub wykwalifikowany personel.
- Urządzenie należy chronić przed upadkiem, uderzeniami i nadmiernym naciskiem. Po upadku nie używać go do czasu sprawdzenia, czy działa prawidłowo.
- Nie przechowywać masażera z zamontowaną końcówką, jeśli instrukcja danego modelu zaleca jej zdjęcie. Urządzenie i akcesoria układać w etui tak, aby nie były zgniatanie ani naprężane.
- Zużytego urządzenia, akumulatora, stacji ładującej, przewodów i akcesoriów elektrycznych nie wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Czyszczenie akcesoriów

- Końcówki masujące należy czyścić po każdym użyciu, szczególnie gdy urządzenie jest używane przez więcej niż jedną osobę.
- Przed czyszczeniem końcówkę należy odłączyć od wyłączonego urządzenia.
- Końcówki bez elementów elektrycznych przecierać miękką ściereczką zgodnie z zaleceniami producenta, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Nie zanurzać końcówek elektrycznych, końcówki grzewczej, kabla USB-C ani stacji ładującej w wodzie i nie myć ich pod bieżącą wodą.
- Powierzchnię końcówki grzewczej czyścić dopiero po jej wyłączeniu, odłączeniu od ładowania i całkowitym ostygnięciu.
- Nie używać końcówki grzewczej, jeżeli powierzchnia grzejna jest pęknięta, odkształcona, nierównomiernie się nagrzewa lub emituje nietypowy zapach.
- Nie stosować olejków, maści, żeli ani substancji łatwopalnych na powierzchni końcówki grzewczej.
- Przed ponownym zamocowaniem należy upewnić się, że każda końcówka jest czysta, sucha i nieuszkodzona.

- Nie udostępniać nieoczyszczonych końcówek kolejnym użytkownikom.

Konserwacja i przechowywanie baterii, stacji ładującej i końcówki grzewczej

- Do ładowania należy używać wyłącznie przewodu, zasilacza lub stacji ładującej o parametrach wskazanych dla danego modelu.
- Model PRO Physio wykorzystuje akumulator litowy 18 V i dedykowane zasilanie DC 18 V / 1 A. Modele PRO Physio PRO i PRO Physio PRO Max wykorzystują akumulator 14,8 V, 2500 mAh i ładowanie USB-C zgodne z instrukcją producenta.
- Stację Charging Base należy podłączyć przewodem USB-C do zgodnego źródła zasilania i ustawić na stabilnej, suchej, nieśliskiej powierzchni.
- Charging Base użytkować w temperaturze od 5°C do 35°C, przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 90% i ciśnieniu atmosferycznym od 70 kPa do 106 kPa.
- Nie przykrywać urządzenia, stacji ani końcówki grzewczej podczas ładowania. Zapewnić swobodny przepływ powietrza i trzymać je z dala od grzejników, ognia i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie ładować urządzenia lub końcówki grzewczej w wilgotnym miejscu, na łatwopalnej powierzchni ani bez nadzoru przez długi czas.
- Nie używać urządzenia podczas ładowania, jeżeli instrukcja danego modelu nie zezwala na taką pracę.
- Końcówka grzewcza ma własny akumulator 3,7 V / 900 mAh i jest ładowana przewodem USB-C. Nie używać uszkodzonego przewodu ani źródła zasilania o niezgodnych parametrach.
- Po zakończeniu masażu wyłączyć końcówkę grzewczą, przytrzymując przycisk przez około 3 sekundy, i pozostawić ją do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem lub schowaniem.
- W przypadku spuchnięcia, wycieku, nadmiernego nagrzewania, uszkodzenia obudowy lub nietypowego zapachu akumulatora należy natychmiast zaprzestać użytkowania i ładowania.
- Nie przebiegać, zgniatać, zwierać ani wrzucać akumulatora lub urządzenia do ognia. Nie pozostawiać ich w zamkniętym samochodzie podczas upału.
- W przypadku dłuższego okresu nieużywania urządzenie należy przechowywać częściowo naładowane, w suchym i chłodnym miejscu, oraz okresowo kontrolować stan akumulatora zgodnie z instrukcją producenta.