

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

## Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

FlexBeam Recharge Health jest przenośnym urządzeniem emitującym światło czerwone i bliską podczerwień. Dokument ma zastosowanie do pojedynczego urządzenia FlexBeam oraz zestawu zawierającego dwa urządzenia. W przypadku zestawu wszystkie zasady bezpieczeństwa należy stosować oddzielnie do każdego urządzenia, jego baterii, zasilacza i akcesoriów.

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi, ostrzeżenia producenta oraz przewodnik dotyczący rozmieszczenia urządzenia na ciele.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i przy użyciu programów opisanych przez producenta. Jeden cykl programu trwa 10 minut.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan obudowy, modułów świetlnych, silikonowych połączeń, otworów wentylacyjnych, przycisków, portu ładowania, pasków, przewodu oraz zasilacza.
- Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo, nadmiernie się nagrzewa, emituje nietypowy zapach, dźwięk lub sygnały błędu, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się z dystrybutorem lub serwisem.
- Nie wolno patrzeć bezpośrednio w diody LED. Nie używać urządzenia w odległości mniejszej niż 30 cm od oczu. Jeżeli rozproszone światło pada bezpośrednio na oczy, należy użyć dołączonych okularów ochronnych.
- Nie umieszczać urządzenia na oczach, twarzy, głowie ani w jej bezpośrednim otoczeniu.
- Nie stosować urządzenia na piersiach, nad gruczołem tarczowym ani na jądrach. FlexBeam nie jest przeznaczony do leczenia zaburzeń endokrynologicznych.
- Urządzenie należy umieszczać bezpośrednio na czystej i suchej skórze, zgodnie z instrukcją producenta. Nie używać na mokrej skórze.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie, nie używać w wannie, pod prysznicem ani w miejscu, w którym może dojść do kontaktu z wodą. W przypadku zalania lub zanurzenia należy przerwać użytkowanie.
- Nie wolno zasłaniać ani blokować otworów wentylacyjnych, ponieważ może to spowodować przegrzanie i automatyczne wyłączenie urządzenia.
- Urządzenie posiada automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem i nadmiernym prądem. Jeżeli temperatura po cyklu jest wyższa niż zwykle, należy przerwać używanie i pozostawić urządzenie do ostygnięcia przez 10-20 minut.
- Paski mocujące należy dopasować stabilnie, ale bez nadmiernego ucisku. Nie mogą powodować bólu, drętwienia, mrowienia ani ograniczenia krążenia.
- Przewód zasilający i paski mogą stwarzać ryzyko zaplątania lub uduszenia. Należy przechowywać je bezpiecznie poza zasięgiem małych dzieci.
- FlexBeam nie jest przeznaczony dla niemowląt ani małych dzieci. Dzieci powyżej 12. roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

- Nie należy używać urządzenia podczas snu ani w sytuacji, w której użytkownik nie może samodzielnie kontrolować reakcji skóry i działania sprzętu.

## Przeciwwskazania

- Nie stosować urządzenia bezpośrednio nad nowotworami złośliwymi ani innymi guzami.
- Nie stosować na otwartych, krwawiących ranach. Ze względów higienicznych urządzenia nie należy umieszczać bezpośrednio na otwartej ranie.
- Bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży i porodu nie zostało ustalone. Przed użyciem w okresie ciąży należy skonsultować się z lekarzem.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem w przypadku aktywnej choroby nowotworowej oraz podczas chemioterapii lub radioterapii.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem w przypadku choroby zakrzepowo-zatorowej, krwawienia, ostrych infekcji ogólnoustrojowych lub choroby serca.
- Nie mocować urządzenia ciasno na obszarach z żylakami, zapaleniem żył lub zakrzepowym zapaleniem żył. Dopuszczalne zastosowanie bez kontaktu ze skórą należy wcześniej uzgodnić ze specjalistą.
- Nie stosować urządzenia w przypadku uczulenia lub reakcji na silikon albo tworzywa sztuczne mające kontakt ze skórą.
- W przypadku gorączki, ostrego stanu zapalnego, zaburzeń krążenia, padaczki, nadwrażliwości na światło, znieczulenia lub zaburzeń czucia przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować na obszarach z niewyjaśnionymi zmianami skórnymi bez wcześniejszej konsultacji medycznej.

## Ograniczenia zastosowania

- FlexBeam nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani leczenia prowadzonego przez lekarza lub innego wykwalifikowanego specjalistę.
- Na jednym obszarze ciała należy stosować tylko jeden 10-minutowy cykl podczas danej sesji. Nie należy dwukrotnie aplikować urządzenia w tym samym miejscu bez przerwy.
- Przy stosowaniu na kilku różnych obszarach producent dopuszcza zwykle od dwóch do czterech 10-minutowych cykli w ciągu dnia. Należy unikać nadmiernego i ciągłego użytkowania oraz robić okresowe przerwy.
- W zestawie dwóch urządzeń nie należy nakładać ich na siebie ani kierować obu jednocześnie na dokładnie ten sam obszar ciała.
- Osoby o ciemnej karnacji powinny zachować ostrożność i ograniczyć czas ekspozycji w jednym miejscu do maksymalnie 10 minut.
- Przy stosowaniu na tatuażach zaleca się skrócenie ekspozycji, użycie łagodniejszego programu albo ominięcie obszaru, szczególnie gdy tatuaż jest świeży lub zawiera duże ilości ciemnego pigmentu.
- Osoby szczególnie wrażliwe na światło powinny rozpocząć od krótszego czasu ekspozycji i obserwować reakcję skóry.

- Po lekach lub suplementach zwiększających światłowrażliwość oraz po dużych dawkach kortykosteroidów należy odczekać zgodnie z zaleceniem lekarza; producent wskazuje co najmniej 3-5 dni, jeżeli specjalista nie zaleci inaczej.
- Należy zachować ostrożność na obszarach obrzękniętych, zakażonych lub objętych stanem zapalnym, ponieważ objawy mogą się nasilić. W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.
- Należy zachować ostrożność przy stosowaniu nad protezami lub implantami. W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.
- W rzadkich przypadkach mogą wystąpić podrażnienie skóry, siniaki, zaczerwienienie, pęcherze, zawroty głowy, nudności lub ból głowy. W takim przypadku należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się ze specjalistą.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu sprzętu emitującego silne zakłócenia elektromagnetyczne. Telefony, tablety i inne przenośne urządzenia radiowe powinny znajdować się co najmniej 30 cm od urządzenia i jego akcesoriów elektrycznych.
- Urządzenie należy użytkować w temperaturze od 0°C do 32°C i przy wilgotności względnej od 10% do 90%, bez kondensacji.

## Konserwacja urządzenia

- Przed czyszczeniem, kontrolą lub przechowywaniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie wolno otwierać obudowy, modyfikować urządzenia ani podejmować samodzielnych napraw. FlexBeam nie jest przeznaczony do serwisowania przez użytkownika.
- Naprawy oraz wymiana akumulatora powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany lub odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy.
- Nie używać własnych ładowarek, przewodów ani akcesoriów innych niż dostarczone lub zatwierdzone przez producenta.
- Regularnie sprawdzać drożność otworów wentylacyjnych. Nie wkładać do nich żadnych przedmiotów i nie usuwać zanieczyszczeń ostrymi narzędziami.
- Urządzenie należy chronić przed upadkiem, uderzeniami, zalaniem, nadmiernym naciskiem i skrajnymi temperaturami.
- Jeżeli wystąpi błąd przegrzania lub nadmiernego prądu, należy wyłączyć urządzenie i pozostawić je na kilka minut. Jeżeli problem powtarza się, zaprzestać używania i skontaktować się z serwisem.
- Zużytego urządzenia i akumulatora nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Ponieważ urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy, w przypadku pożaru należy używać gaśnicy odpowiedniej do urządzeń elektrycznych i baterii litowych, zgodnie z lokalnymi zasadami bezpieczeństwa.

## Czyszczenie akcesoriów

- Powierzchnię FlexBeam mającą kontakt ze skórą zaleca się czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu albo przed zastosowaniem u innej osoby.

- Powierzchnie kontaktowe można przecierać chusteczkami zawierającymi 70% alkohol izopropylowy. Pozostałą część urządzenia należy czyścić lekko wilgotną ściereczką.
- Nie rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na urządzenie i nie dopuszczać do przedostania się płynu do otworów wentylacyjnych, przycisków ani portu zasilania.
- Nie używać środków żrących, alkoholu etylowego, chlorku amonu, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów, ponieważ mogą uszkodzić lub spękać obudowę.
- Paski mocujące należy czyścić zgodnie z instrukcją producenta i dokładnie wysuszyć przed ponownym użyciem lub umieszczeniem w etui.
- Okulary ochronne należy czyścić miękką, nieścierną ściereczką. Nie używać ich, jeżeli są pęknięte, mocno zarysowane lub nie zapewniają prawidłowego dopasowania.
- Przed ponownym podłączeniem do zasilania należy upewnić się, że urządzenie, przewód, wtyczki i akcesoria są całkowicie suche.

## Konserwacja i przechowywanie baterii, zasilacza, pasków, okularów oraz etui

- Przed pierwszym użyciem urządzenie należy w pełni naładować. Pełne ładowanie rozładowanej baterii trwa około 2 godzin.
- Do ładowania należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego lub zatwierdzonego przez Recharge Health. Należy przestrzegać parametrów podanych na tabliczce znamionowej konkretnego urządzenia i zasilacza.
- Nie wolno przeładowywać urządzenia. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć zasilacz, jeżeli instrukcja konkretnej wersji produktu nie wskazuje inaczej.
- Nie wolno samodzielnie wymieniać, przebijać, zgniatać, rozmontowywać ani podgrzewać akumulatora litowo-jonowego.
- W przypadku pęcznienia, wycieku, dymu, zapachu spalenizny, deformacji lub nadmiernego nagrzewania należy natychmiast przerwać używanie i ładowanie oraz odłączyć urządzenie od zasilania, jeżeli można to zrobić bezpiecznie.
- Urządzenie może pracować podczas ładowania, jednak przewód należy ułożyć tak, aby nie powodował ryzyka potknięcia, zaplątania lub wyrwania wtyczki.
- FlexBeam należy przechowywać w dostarczonym etui, aby ograniczyć dostęp kurzu i zanieczyszczeń do urządzenia i otworów wentylacyjnych.
- W zestawie dwóch urządzeń każde urządzenie, przewód i zasilacz należy przechowywać w sposób zapobiegający wzajemnemu naciskowi, zarysowaniu i splątaniu przewodów.
- Paski należy przechowywać suche, rozpięte i bez nadmiernego zagięcia. Nie używać pasków z uszkodzonym rzepem, pęknięciem lub trwałym odkształceniem.
- Okulary ochronne należy przechowywać w sposób chroniący soczewki przed zarysowaniem i odkształceniem.
- Nie przechowywać urządzenia ani akcesoriów w miejscu narażonym na wilgoć, kondensację, skrajne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne lub materiały łatwopalne.