

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

LedBoots AVACR7 to urządzenie do fotobiomodulacji, łączące światło czerwone o długości fali 660 nm, światło podczerwone o długości fali 850 nm oraz ergonomiczny ucisk do 25 mmHg. Produkt obejmuje jedną regulowaną nogawkę przeznaczoną do stosowania na jednej nodze, zasilacz i torbę transportową.

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia oraz przestrzegać wszystkich zaleceń producenta.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan nogawki, diod LED, przewodów, złączy, panelu sterowania i zasilacza. Nie używać produktu, jeżeli którykolwiek element jest uszkodzony, przegrzany, zdeformowany lub działa nieprawidłowo.
- Nogawkę należy założyć i dopasować do nogi zgodnie z instrukcją, bez nadmiernego zaciskania. Kompresja nie może powodować bólu, drętwienia, mrowienia, sinienia skóry ani ograniczenia krążenia.
- Podczas sesji noga powinna pozostawać w pozycji spoczynkowej. Nie należy chodzić, biegać ani wykonywać ćwiczeń z założonym i uruchomionym urządzeniem.
- Czas pracy należy ustawić w zakresie od 1 do 60 minut, zgodnie z indywidualną tolerancją i instrukcją producenta. Przy pierwszym użyciu zaleca się rozpocząć od krótszej sesji.
- Moc światła można ustawić na 50% lub 100%. U osób o ciemniejszej karnacji - fototyp V lub VI według skali Fitzpatricka - a także przy skórze wrażliwej, problemach dermatologicznych, bliznach lub tatuażach należy rozpocząć od mocy 50%.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na świecące diody LED ani kierować światła w stronę oczu.
- Nie przykrywać panelu sterowania, zasilacza ani elementów elektrycznych podczas pracy, ponieważ może to ograniczyć odprowadzanie ciepła.
- Nie używać urządzenia w wannie, pod prysznicem, w pobliżu basenu ani w innym wilgotnym miejscu. Nie dotykać zasilacza, przewodów i złączy mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia podczas snu, prowadzenia pojazdu ani obsługi maszyn.
- Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie ocenić ryzyka, mogą korzystać z produktu wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie podejmować samodzielnych napraw urządzenia, zasilacza ani przewodów.

Przeciwwskazania

- Nie stosować u osób z nadwrażliwością na światło lub alergią na światło.
- Nie stosować w okresie ciąży.
- Nie stosować u osób z padaczką fotowrażliwą.

- Nie stosować u osób z chorobą nowotworową, masami nowotworowymi lub zmianami o charakterze nowotworowym.
- Nie stosować u osób przyjmujących leki lub poddawanych terapiom, które zwiększają wrażliwość skóry na światło.
- Nie stosować bez wcześniejszej konsultacji medycznej u osób z chorobami oczu wrażliwymi na światło, w tym retinopatią cukrzycową, jaskrą lub zaćmą.
- Nie stosować w przypadku ostrego obrzęku płuc.
- Nie stosować w przypadku nadciśnienia, jeżeli lekarz nie dopuścił terapii światłem i uciskiem.
- Nie stosować w przypadku róży, ostrego zakrzepowego zapalenia żył, zakrzepicy żył głębokich ani przebytych lub podejrzewanych epizodów zatorowości płucnej.
- Nie stosować w przypadku ostrej niewydolności serca.
- Nie stosować w przypadku ostrej infekcji.
- Nie stosować na obszarach z otwartymi ranami, podrażnieniami, infekcjami, szwami pooperacyjnymi, świeżymi urazami lub guzami.
- Nie stosować w przypadku neuropatii obwodowej, która może ograniczać prawidłowe odczuwanie światła, ciepła, nacisku lub bólu.
- Nie stosować w przypadku niedrożności układu limfatycznego.
- Nie stosować na obszarze złamania kości lub zwichnięcia stawu.

Ograniczenia zastosowania

- Urządzenie należy stosować wyłącznie na kończynie dolnej lub obszarze wskazanym przez producenta. Nie stosować na głowie, twarzy, szyi, klatce piersiowej ani w innych nieprzewidzianych miejscach.
- Produkt nie zastępuje diagnozy, leczenia ani rehabilitacji zaleconej przez lekarza lub fizjoterapeutę.
- Przed rozpoczęciem terapii należy upewnić się, że skóra jest czysta i sucha. Zalecana jest lekka odzież umożliwiająca prawidłowe dopasowanie nogawki; bezpośredni kontakt światła ze skórą powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosować kosmetyków, kremów, olejków ani preparatów na skórę, jeżeli mogą one zwiększać światłoczułość lub wpływać na reakcję skóry.
- Należy regularnie kontrolować skórę podczas sesji, szczególnie przy pierwszym użyciu, skórze wrażliwej, bliznach, tatuażach lub ciemniejszej karnacji.
- W przypadku wystąpienia bólu, pieczenia, nadmiernego ciepła, podrażnienia, wysypki, zawrotów głowy, nudności, drętwienia, mrowienia, zblednięcia lub zasinienia skóry należy natychmiast przerwać sesję.
- Jeżeli objawy utrzymują się po wyłączeniu urządzenia, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować nadmiernej kompresji. Nacisk do 25 mmHg służy dopasowaniu nogawki i nie powinien powodować dyskomfortu ani zaburzeń czucia.
- Nie przekraczać czasu i intensywności zalecanych przez producenta ani nie wykonywać kolejnych sesji bez przerwy, jeżeli urządzenie lub skóra są nadmiernie nagrzane.

- Nie używać urządzenia jednocześnie z innym źródłem światła terapeutycznego, ogrzewania, kompresji lub elektrostymulacji na tym samym obszarze bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.
- W przypadku chorób przewlekłych, zaburzeń krążenia, cukrzycy, obrzęków o nieznanej przyczynie lub niedawnego zabiegu chirurgicznego przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

Konserwacja urządzenia

- Przed czyszczeniem, kontrolą lub przechowywaniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilacz od sieci oraz od nogawki.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu, bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Nie zanurzać nogawki, panelu sterowania, przewodów ani zasilacza w wodzie lub innych płynach.
- Nie zginać, nie skręcać ani nie zginać nadmiernie nogawki, ponieważ może to uszkodzić diody LED, przewody wewnętrzne lub elementy kompresyjne.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu i nie przechowywać go w sposób powodujący trwałe odkształcenie.
- Nie używać urządzenia po upadku, zalaniu, silnym uderzeniu lub zauważeniu nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania albo nierównomiernego działania diod.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany lub odpowiednio wykwalifikowany serwis.
- Zużytego urządzenia i elementów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Czyszczenie akcesoriów

- Nogawkę należy czyścić po odłączeniu od zasilania, używając miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki oraz środków zgodnych z instrukcją producenta.
- Nie używać wybielaczy, rozpuszczalników, alkoholu o wysokim stężeniu, środków ściernych ani agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał, diody lub przewody.
- Nie prać urządzenia w pralce i nie suszyć go w suszarce, chyba że instrukcja producenta wyraźnie dopuszcza taki sposób czyszczenia.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do panelu sterowania, złączy, przewodów, diod LED i zasilacza.
- Przed ponownym użyciem lub podłączeniem do zasilania należy upewnić się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.
- Torba transportowa powinna być czyszczona zgodnie z oznaczeniami materiału. Przed umieszczeniem urządzenia w torbie należy sprawdzić, czy nogawka, przewody i zasilacz są suche i ostygły.
- Nie używać zasilacza lub przewodu, jeżeli izolacja, obudowa, wtyczka lub złącze są uszkodzone, poluzowane, przegrzane lub noszą ślady korozji.

Konserwacja i przechowywanie zasilacza oraz torby transportowej

- Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem lub zamiennika wyraźnie zatwierdzonego przez producenta.
- Parametry zasilania urządzenia to: napięcie wejściowe 110-220 V, częstotliwość 50-60 Hz oraz wyjście zasilacza 12,5 V DC / 5,7 A, 71,25 W.
- Zasilacz należy podłączać wyłącznie do sprawnego, prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego.
- Nie podłączać ani nie odłączać zasilacza mokrymi rękami. Nie używać go w pobliżu wody lub na wilgotnej powierzchni.
- Nie przykrywać zasilacza podczas pracy. Należy zapewnić mu swobodny przepływ powietrza i chronić go przed przegrzaniem.
- Przewód należy prowadzić w sposób, który nie powoduje ryzyka potknięcia, zgniecenia, przecięcia lub wyrwania złącza.
- Odłączając urządzenie, należy chwytać za wtyczkę lub złącze, a nie ciągnąć za przewód.
- Po zakończeniu sesji należy wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilacz i pozostawić wszystkie elementy do ostygnięcia przed umieszczeniem w torbie.
- Urządzenie, zasilacz i przewody należy ułożyć w torbie bez ostrych zagięć i bez nacisku mogącego uszkodzić diody, przewody lub złącza.
- Torby nie należy pozostawiać w zamkniętym pojeździe narażonym na wysoką lub bardzo niską temperaturę ani w miejscu wilgotnym.