

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkownika produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady stosowania

- System MX3 jest przeznaczony do monitorowania poziomu nawodnienia organizmu, służy do oceny stanu nawodnienia na podstawie pomiaru bioimpedancji.
- Urządzenie należy używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić dokładność wyników i bezpieczeństwo użytkownika.
- Pomiar należy wykonywać w stanie spoczynku, najlepiej rano, na czczo, bez wcześniejszego spożywania posiłków i napojów.
- Przed rozpoczęciem pomiaru użytkownik powinien upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo naładowane oraz że elektrody mają odpowiedni kontakt z ciałem.
- Urządzenie należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Wyniki pomiarów powinny być traktowane jako wskazówka, a nie zastępstwo dla diagnozy medycznej.
- Wyniki pomiaru nawodnienia można interpretować na podstawie zaleceń producenta, jednak w przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Środki ostrożności

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku zewnętrznego i nie powinno być stosowane w sposób, który może narazić je na uszkodzenia mechaniczne.
- Należy unikać używania urządzenia w wilgotnych warunkach, takich jak kontakt z wodą, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki.
- System nie jest przeznaczony do diagnozowania chorób ani do stosowania jako jedyny środek w ocenie stanu zdrowia. Wyniki pomiarów mogą być zróżnicowane w zależności od wielu czynników, takich jak poziom aktywności fizycznej, pora dnia czy dieta.
- Nie należy stosować systemu MX3, jeśli użytkownik posiada wszczepione urządzenie medyczne, takie jak rozrusznik serca, stymulatory lub implanty metalowe w ciele, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak nieoczekiwane wyniki pomiarów lub uszkodzenie urządzenia, należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z producentem lub autoryzowanym serwisem.

Stosowanie przez dzieci

- Urządzenie MX3 nie jest przeznaczone do stosowania przez dzieci poniżej 14. roku życia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Pomiar u dzieci powinien być przeprowadzany tylko pod kontrolą osoby dorosłej, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe umiejscowienie elektrod i interpretację wyników.

- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie używały urządzenia samodzielnie, ponieważ niewłaściwe użycie może prowadzić do uzyskania błędnych wyników lub uszkodzenia sprzętu.
- W przypadku dzieci, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek chorób przewlekłych lub wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka.

Zastrzeżenia medyczne

Ocena nawodnienia MX3 i podawana kategoria nawodnienia nie jest poradą medyczną. Jeśli po wysiłku odczuwane są bóle głowy, zawroty głowy, nudności lub inne objawy odwodnienia to należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Kategorie i porady dotyczące nawadniania oparte są na danych dotyczących populacji i mogą różnić się od Twojego osobistego profilu nawodnienia, obliczonego na podstawie OHZ użytkownika.