

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność w poniższych przypadkach i w razie potrzeby dostosować użytkowanie urządzenia. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

- Niedawne urazy lub operacje
- Cięża
- Nadciśnienie (kontrolowane)
- Nieprawidłowe odczucia (np. drętwienie)
- Wrażliwość na zimno lub ciepło
- Łagodna neuropatia obwodowa
- Urządzenie powinno być dopasowane, ale nie może ograniczać krążenia
- Nie używać urządzenia podczas snu

Przeciwwskazania

Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem w poniższych przypadkach:

- Wysypka, rany, oparzenia, zapalenie tkanek, infekcje, siniaki, guzy
- Nadciśnienie (niekontrolowane)
- Choroby naczyniowe, żylaki, zakrzepy, zapalenie żył
- Ostre choroby serca, wątroby lub nerek
- Ciężka neuropatia obwodowa
- Ucisk w miejscu operacji
- Alergia na materiał urządzenia
- Niezwykły kształt kończyny
- Nie używać w przypadku niewyjaśnionego bólu
- Cięża, karmienie
- Nowotwory, guzy
- Choroby serca

Uwagi dotyczące napraw

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie należy podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. W przypadku usterki skontaktuj się oficjalnym dystrybutorem marki Therabody - firmą WERON.

Ryzyko związane z przegrzaniem urządzenia

Nie należy użytkować urządzenia przez dłuższy czas i bez przerwy, gdyż może to spowodować przegrzanie się urządzenia. W przypadku przegrzania natychmiast należy wyłączyć urządzenie i w razie jego ładowania odłączyć od zasilania.

Ryzyko porażenia prądem

Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia kabla zasilającego. Należy:

- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Unikać używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł wody (chyba, że producent podaje, że urządzenie jest wodoodporne).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ryzyko związane z bateriami

Użytkownik jest zobowiązany do:

- Ładowania urządzenia wyłącznie przy użyciu oryginalnego zasilacza dostarczonego przez producenta.
- Unikania przeładowania urządzenia oraz dbałości o właściwą konserwację baterii.
- Regularnego monitorowania stanu baterii, aby uniknąć jej całkowitego wyczerpania, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z baterią, takich jak przegrzewanie się, wycieki lub uszkodzenia, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

Użytkowanie urządzenia przez dzieci

Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe nadzorowały jego użytkowanie.

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w technologię dostarczającą wibracje, terapię ciepłem, terapię zimnem, terapię LED i światłem podczerwonym, może stanowić to zagrożenie dla zdrowia dzieci, które nie są w stanie prawidłowo ocenić ryzyka lub stosować się do instrukcji użytkowania.

Ryzyko związane z przechowywaniem urządzenia

Urządzenie powinno być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy unikać przechowywania urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia.

Po każdym użyciu urządzenie należy wyłączyć i przechować w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu oraz innych elementów, które mogą uszkodzić jego funkcje.

Ryzyko związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia

Urządzenie NIE jest wodoodporne ani przeznaczone do prania w pralce. Nie należy dopuszczać do przedostania się nadmiaru płynów lub wody do urządzenia.

Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

Aby wyczyścić, należy przetrzeć wewnętrzną powierzchnię paska wilgotną ściereczką z mikrofibry. Należy dokładnie przetrzeć urządzenie, ramę paska oraz paski.