

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność w poniższych przypadkach, a stosowanie urządzenia może wymagać modyfikacji. W razie wątpliwości lub jakichkolwiek obaw, zaleca się skonsultowanie z lekarzem:

- Niedawno przebyta kontuzja lub operacja
- Cięża
- Nadciśnienie tętnicze (kontrolowane)
- Nieprawidłowe odczucia (np. drętwienie, pieczenie)
- Nadwrażliwość na ucisk
- Łagodna neuropatia obwodowa
- Używaj urządzenia zgodnie z zaleceniami, aby uniknąć nadmiernego ucisku
- Urządzenie powinno być stosowane tylko na czystej, zdrowej skórze
- Nie używaj urządzenia podczas snu ani długotrwałego odpoczynku

Przeciwwskazania

W przypadku poniższych stanów, ryzyko może przewyższać korzyści, dlatego przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą:

- Wysypki skórne, otwarte rany, pęcherze, stany zapalne tkanek, infekcje, siniaki lub nowotwory
- Złamania kości, uszkodzenia tkanki mięśniowej lub zapalenie mięśniowo-kostne (myositis ossificans)
- Nadciśnienie tętnicze (niekontrolowane)
- Choroby naczyniowe, tętnicze i zaburzenia krążenia (zakrzepy, zapalenie żył, zakrzepica, żylaki)
- Ostra lub przewlekła choroba serca, wątroby lub nerek
- Ciężka neuropatia obwodowa lub inne przyczyny upośledzenia czucia
- Zaburzenia krzepnięcia krwi lub przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
- Stosowanie leków wpływających na czucie lub zmieniających krążenie krwi
- Bezpośredni kontakt z miejscami operowanymi, ranami lub implantami
- Obecność stymulatora serca (pacemakera) lub kardiowertera-defibrylatora (ICD)
- Historia zatorów lub zatorowości płucnej
- Alergia na materiał urządzenia lub skórne reakcje uczuleniowe
- Znaczna deformacja kończyny lub nietypowy kształt/rozmiar ciała uniemożliwiający prawidłowe użycie urządzenia
- Nie stosować w przypadku niewyjaśnionego bólu lub obrzęku w okolicy stosowania

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia TheraCup.

Uwagi dotyczące napraw

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie należy podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. W przypadku usterki skontaktuj się oficjalnym dystrybutorem marki Therabody - firmą WERON.

Ryzyko związane z przegrzaniem urządzenia

Nie należy użytkować urządzenia przez dłuższy czas i bez przerwy, gdyż może to spowodować przegrzanie się urządzenia. W przypadku przegrzania natychmiast należy wyłączyć urządzenie i w razie jego ładowania odłączyć od zasilania.

Ryzyko porażenia prądem

Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia kabla zasilającego. Należy:

- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Unikać używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł wody (chyba, że producent podaje, że urządzenie jest wodoodporne).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ryzyko związane z bateriami

Użytkownik jest zobowiązany do:

- Ładowania urządzenia wyłącznie przy użyciu oryginalnego zasilacza dostarczonego przez producenta.
- Unikania przeładowania urządzenia oraz dbałości o właściwą konserwację baterii.
- Regularnego monitorowania stanu baterii, aby uniknąć jej całkowitego wyczerpania, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z baterią, takich jak przegrzewanie się, wycieki lub uszkodzenia, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

Użytkowanie urządzenia przez dzieci

Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe nadzorowały jego użytkowanie.

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w technologię dostarczającą wibracje, terapię ciepłem, terapię zimnem, terapię LED i światłem podczerwonym, może stanowić to zagrożenie dla zdrowia dzieci, które nie są w stanie prawidłowo ocenić ryzyka lub stosować się do instrukcji użytkowania.

Ryzyko związane z przechowywaniem urządzenia

Urządzenie powinno być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy unikać przechowywania urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia.

Po każdym użyciu urządzenie należy wyłączyć i przechować w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu oraz innych elementów, które mogą uszkodzić jego funkcje.

Ryzyko związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia

Należy używać chusteczek dezynfekujących do czyszczenia kubków i elementu grzewczego.

Czyścić TheraCup należy za pomocą lekko wilgotnej ściereczki lub roztworu na bazie alkoholu, jeśli urządzenie miało kontakt z substancjami, które mogą powodować plamy lub inne uszkodzenia, takimi jak: brud, piasek, makijaż, atrament, mydło, detergent, kwasy lub kwaśne jedzenie, lub z płynami innymi niż świeża woda, w tym tymi, które mogą prowadzić do podrażnienia skóry, takimi jak: pot, woda morską, woda z mydłem, woda basenowa, perfumy, repelent przeciwko owadom, balsamy, filtr przeciwsłoneczny, oleje, środki do usuwania kleju, farba do włosów lub rozpuszczalniki.

W celu osuszenia TheraCup należy użyć nieabrazyjnej, bezwłóknistej ściereczki.

TheraCup jest wyposażony w wymienne filtry, które zapobiegają uszkodzeniu urządzenia przez substancje obce. Aby wymienić filtr, zdejmij małą gumową nasadkę znajdującą się na górze poduszki grzewczej. Wymieniaj filtr co sześć miesięcy.