

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Warm Pro AVACR7 jest przenośnym pasem przeznaczonym do stosowania w okolicy lędźwiowej. Urządzenie łączy równomierne ogrzewanie z regulowaną wibracją. Wyposażono je w 3 poziomy temperatury: 45°C, 50°C i 55°C, 3 poziomy wibracji oraz automatyczny, zaprogramowany czas pracy wynoszący 15 minut. Należy używać go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta.

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz oznaczeniami znajdującymi się na urządzeniu, zasilaczu i opakowaniu.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan pasa, neoprenu, elementów grzewczych, panelu sterowania, szwów, przewodów, portu USB-C oraz zasilacza. Nie używać elementów uszkodzonych, zdeformowanych, zalanych lub działających nieprawidłowo.
- Pas należy umieścić i dopasować wokół dolnej części pleców. Powinien przylegać stabilnie, ale nie może ograniczać oddychania ani krążenia.
- Sesję należy rozpoczynać od najniższego poziomu temperatury i najniższej intensywności wibracji. Wyższe ustawienia stosować wyłącznie wtedy, gdy ciepło i wibracje są dobrze tolerowane.
- Poziom 55°C może powodować intensywne odczucie ciepła. Należy regularnie kontrolować stan skóry i natychmiast przerwać użytkowanie w przypadku pieczenia, bólu, silnego zaczerwienienia, pęcherzy lub drętwienia.
- Nie wolno zasypiać podczas korzystania z urządzenia ani używać go u osoby nieprzytomnej, śpiącej lub niezdolnej do samodzielnego przerwania sesji.
- Nie stosować urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, obsługi maszyn ani wykonywania czynności wymagających pełnej kontroli ruchów.
- Nie przykrywać włączonego urządzenia kocem, poduszką, ciężką odzieżą ani innym materiałem zatrzymującym ciepło.
- Nie stosować urządzenia jednocześnie z termoforem, poduszką elektryczną, kocem grzewczym, lampą grzewczą ani innym źródłem ciepła.
- Nie nakładać przed sesją maści rozgrzewających, plastrów rozgrzewających, olejków ani preparatów mogących zwiększać odczuwanie lub zatrzymywanie ciepła.
- Nie używać urządzenia w wannie, pod prysznicem, w saunie, na mokrej skórze ani w pobliżu wody. Nie dotykać portu ładowania, przewodu i zasilacza mokrymi rękami.
- Urządzenie, zasilacz, kabel i torbę transportową należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci nie powinny korzystać z produktu bez bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej.
- Nie demontować, nie przebijać, nie zginać i nie modyfikować urządzenia ani jego części.

Przeciwwskazania

- Nie stosować urządzenia na otwartych ranach, oparzeniach, wysypce, aktywnej infekcji, zmianach skórnych, obszarach silnie podrażnionych ani na skórze z zaburzonym czuciem.
- Nie stosować w przypadku ciężkiej neuropatii, znacznego drętwienia lub innych zaburzeń czucia, które mogą uniemożliwić prawidłową ocenę temperatury.
- Nie stosować na obszarze świeżego urazu, aktywnego krwawienia, ostrego obrzęku, podejrzenia złamania ani bezpośrednio nad miejscem niedawnej operacji bez zgody lekarza.
- Nie stosować w przypadku ostrej infekcji, gorączki, aktywnego stanu zapalnego lub niewyjaśnionego, nasilającego się bólu w okolicy lędźwiowej.
- Nie stosować na obszarze potwierdzonej lub podejrzewanej zakrzepicy, zapalenia żył, ciężkich zaburzeń krążenia lub niedokrwienia tkanek.
- Osoby z cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych lub innymi schorzeniami mogącymi zaburzać czucie albo ukrwienie powinny skonsultować użycie z lekarzem.
- W przypadku ciąży nie należy stosować urządzenia w okolicy brzucha ani dolnej części pleców bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
- Osoby z nowotworem, aktywną chorobą nowotworową lub guzem w obszarze stosowania powinny skonsultować użycie urządzenia z lekarzem.
- W przypadku ciężkich chorób serca, niekontrolowanego nadciśnienia lub innych poważnych chorób przewlekłych przed użyciem należy zasięgnąć porady lekarza.

Ograniczenia zastosowania

- Produkt jest przeznaczony do wspomagania rozluźnienia i regeneracji mięśni w okolicy lędźwiowej. Nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom i nie zastępuje konsultacji lekarskiej lub fizjoterapeutycznej.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie w okolicy dolnej części pleców, zgodnie z instrukcją producenta. Nie zakładać go na szyję, głowę, klatkę piersiową ani bezpośrednio na brzuch.
- Należy przestrzegać zaprogramowanego czasu sesji wynoszącego 15 minut. Przed kolejnym użyciem należy pozwolić skórze i urządzeniu ostygnąć.
- Nie używać najwyższego poziomu temperatury przy pierwszej sesji ani u osób szczególnie wrażliwych na ciepło.
- Podczas użytkowania należy pozostać w stanie czuwania i regularnie sprawdzać, czy pas nie przesunął się, nie został zbyt mocno zaciśnięty i nie powoduje miejscowego przegrzania.
- W przypadku bólu promieniującego do kończyn, osłabienia mięśni, nagłego drętwienia, zaburzeń kontroli pęcherza lub jelit albo bólu po poważnym urazie należy przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
- Nie używać urządzenia bezpośrednio po intensywnym wysiłku, jeżeli skóra jest silnie rozgrzana, podrażniona lub mokra od potu. Przed sesją należy osuszyć i schłodzić skórę do komfortowej temperatury.
- Nie używać urządzenia po spożyciu alkoholu, środków odurzających ani leków powodujących senność lub osłabiających zdolność odczuwania ciepła.

- Jeżeli podczas lub po zastosowaniu wystąpi nietypowe pogorszenie samopoczucia, utrzymujące się zaczerwienienie, ból, pęcherze albo podrażnienie, należy zaprzestać korzystania z produktu.

Konserwacja urządzenia

- Przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie zanurzać pasa, panelu sterowania, zasilacza ani przewodu w wodzie lub innych płynach. Nie prać urządzenia w pralce i nie czyścić go pod bieżącą wodą, chyba że instrukcja producenta wyraźnie stanowi inaczej.
- Nie składać gwałtownie, nie skręcać, nie zgniatać i nie przebijać obszaru zawierającego elementy grzewcze. Uszkodzenie wewnętrznych przewodów może prowadzić do nierównomiernego grzania, zwarcia lub pożaru.
- Regularnie kontrolować, czy urządzenie ogrzewa równomiernie. W przypadku wystąpienia wyraźnie gorącego punktu, nietypowego zapachu, dymu, trzasków lub samoczynnego wyłączenia należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie otwierać obudowy i nie podejmować samodzielnych napraw. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany lub odpowiednio wykwalifikowany serwis.
- Po upadku, silnym uderzeniu, zalaniu albo długotrwałym przegrzaniu urządzenia należy zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia jego stanu.
- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czyszczenie akcesoriów

- Powierzchnię pasa i neoprenu należy przecierać miękką, lekko wilgotną ściereczką. W razie potrzeby można użyć niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego, o ile jest on zgodny z zaleceniami producenta.
- Nie stosować wybielaczy, rozpuszczalników, czystego alkoholu, środków ściernych ani silnych detergentów, które mogą uszkodzić neopren, elementy grzewcze lub powierzchnię panelu sterowania.
- Nie dopuszczać do przedostania się płynu do przycisków, złączy, portu USB-C ani szczelin urządzenia.
- Po czyszczeniu urządzenie należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie suszyć na grzejniku, suszarką, w suszarce bębnowej ani w bezpośrednim słońcu.
- Zasilacz i kabel USB-C należy czyścić wyłącznie po odłączeniu od sieci i urządzenia, używając suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Torba transportowa powinna być czysta i sucha. Nie umieszczać w niej urządzenia, dopóki nie ostygnie ono i nie wyschnie całkowicie.

Konserwacja i przechowywanie baterii, zasilacza, kabla USB-C oraz torby transportowej

- Urządzenie zawiera wbudowaną baterię o parametrach 7,4 V, 5200 mAh i 38,4 Wh. Nie należy jej samodzielnie wymieniać, otwierać ani modyfikować.
- Do ładowania należy używać zasilacza i kabla USB-C dostarczonych z urządzeniem albo akcesoriów o parametrach wyraźnie dopuszczonych przez producenta.
- Przed ładowaniem należy sprawdzić, czy port USB-C, przewód, zasilacz i gniazdo elektryczne są suche, czyste i nieuszkodzone.
- Ładować na stabilnej, suchej, niepalnej i dobrze wentylowanej powierzchni, z dala od wody, bezpośredniego słońca, grzejników i materiałów łatwopalnych.
- Nie przykrywać urządzenia ani zasilacza podczas ładowania. Nie ładować w zamkniętej torbie transportowej.
- Nie używać kabla z uszkodzoną izolacją, wygiętą wtyczką, luźnym złączem lub śladami przegrzania. Nie przenosić urządzenia, ciągnąc za kabel.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania, pęcznienia, wycieku, deformacji, dymu lub zapachu spalenizny należy natychmiast przerwać ładowanie i użytkowanie oraz odłączyć zasilanie, jeżeli można to zrobić bezpiecznie.
- Nie wrzucać urządzenia ani baterii do ognia, nie narażać na temperatury ekstremalne i nie pozostawiać w nagrzanym samochodzie.
- Urządzenie przechowywać na płasko lub luźno zwinięte, bez silnego zaginania elementów grzewczych i bez układania na nim ciężkich przedmiotów.
- Do torby transportowej wkładać wyłącznie urządzenie wyłączone, chłodne, suche i odłączone od przewodu. Zasilacz oraz kabel zabezpieczyć przed zgnieceniem i ostrym zagięciem.
- Podczas dłuższego przechowywania należy okresowo kontrolować stan urządzenia i baterii oraz chronić baterię przed całkowitym rozładowaniem zgodnie z instrukcją producenta.
- Zużyty baterię, zasilacz i kabel należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i baterii.