

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

YouTecar X FASCIA jest przeznaczony do profesjonalnego użytku w rehabilitacji, fizjoterapii, terapii manualnej i medycynie sportowej. Powinien być stosowany wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów zgodnie z zaleceniami producenta. Przed rozpoczęciem terapii należy upewnić się, że pacjent nie ma przeciwwskazań do jej stosowania.

- Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją używania.
- Należy przestrzegać zaleceń dotyczących parametrów zabiegu, aby uniknąć przegrzania tkanek.
- Nie stosować w pobliżu metalowych implantów, jeśli nie jest to zgodne z wytycznymi producenta.
- Unikać kontaktu elektrod, aplikatorów i narzędzia FASCIA z ranami lub uszkodzoną skórą.
- Regularnie kontrolować stan kabli, elektrod, aplikatorów i narzędzia powięziowego.
- Unikać kontaktu urządzenia z cieczą lub użytkowania w wilgotnym pomieszczeniu.
- Nie dezynfekować ani nie sterylizować jednostki głównej urządzenia.
- Urządzenie należy poddawać okresowej kontroli technicznej bezpieczeństwa, przeprowadzanej przez upoważniony personel techniczny.
- W przypadku pojawienia się dymu lub wyczucia zapachu spalenizny należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Unikać uruchamiania urządzenia w pobliżu działania silnego pola elektromagnetycznego.
- Nie używać urządzenia w pobliżu gazu lub oparów łatwopalnych.

Przeciwwskazania

- Cięża.
- Rozrusznik serca lub inne implantowane urządzenia elektroniczne.
- Metalowe implanty lub protezy, jeżeli instrukcja producenta nie dopuszcza zabiegu.
- Nowotwory i stany zapalne o nieznannej etiologii.
- Zaburzenia krążenia, zakrzepica i problemy z krzepnięciem krwi.
- Gorączka i ostre infekcje.
- Otwarte rany, oparzenia, uszkodzenie skóry lub aktywne zapalenie w obszarze zabiegu.
- Znaczne zaburzenia czucia lub brak możliwości wiarygodnego zgłaszania odczuć przez pacjenta.
- Zachować szczególną uwagę w stosowaniu terapii w obszarze szyi.

- Zabieg może wywołać tymczasowy spadek ciśnienia. Pacjent powinien odpocząć kilka minut po zabiegu.
- Podczas zabiegu może wystąpić zaostrzenie bólu; należy zmniejszyć moc i skrócić czas zabiegu. Jeżeli objawy się utrzymują, należy przerwać terapię i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku przerywania ciągłości skóry, krwawienia, pieczenia lub podejrzenia oparzenia należy natychmiast przerwać zabieg.

Ograniczenia zastosowania

- Terapia Tecar powinna być stosowana z uwzględnieniem indywidualnych wskazań medycznych.
- Osoby z nadwrażliwością skórną, zaburzeniami czucia lub niską tolerancją na ciepło wymagają szczególnej ostrożności.
- Nie stosować w połączeniu z substancjami o nieznanym działaniu przewodzącym.
- W przypadku pacjentów z niskim ciśnieniem należy zachować szczególną ostrożność podczas zabiegów w okolicach szyi.
- W przypadku urazów z obrzękiem lub wysiękiem terapię rozpocząć nie wcześniej niż 24-48 godzin od urazu, po uzyskaniu opinii lekarza.
- Narzędzie FASCIA prowadzić z naciskiem dostosowanym do anatomii i tolerancji pacjenta; nie stosować nadmiernej siły.

Konserwacja urządzenia

- Urządzenie powinno być przechowywane w suchym i wolnym od kurzu miejscu.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny urządzenia oraz kabli, aby uniknąć awarii.
- Nie otwierać obudowy urządzenia - wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis.
- Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Czyścić urządzenie czystą szmatką zwilżoną wodą, bez używania rozpuszczalników, czystego alkoholu ani agresywnych detergentów.
- W przypadku uderzeń lub upadków urządzenia albo akcesoriów należy sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone; w razie zmian powstrzymać się od użytkowania.
- Proces czyszczenia i konserwacji przeprowadzać według instrukcji producenta.

Czyszczenie akcesoriów

- Elektrody, aplikatory i narzędzie FASCIA powinny być czyszczone po każdym użyciu za pomocą środka zgodnego z wytycznymi producenta.
- Nie zanurzać elektrod, rękojeści ani narzędzia w wodzie i nie stosować agresywnych detergentów.
- Przechowywać akcesoria w odpowiednich pojemnikach, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzać stan elektrod, aplikatorów i kabli - w przypadku widocznych uszkodzeń należy je wymienić.

- Czyszczenie akcesoriów jest warunkiem koniecznym do ograniczenia ryzyka przenoszenia patogenicznych bakterii poprzez przedmioty i powierzchnie.
- Czyszczenie musi być dokładne i wykonywane po każdym użyciu, przed kolejnym zabiegiem - nie używać akcesoriów przed ich całkowitym wyschnięciem.
- Przeprowadzać procedurę tylko wtedy, gdy akcesoria są odłączone od urządzenia.
- Pozostałości kremu przewodzącego usuwać niezwłocznie. Proces czyszczenia przeprowadzać według instrukcji producenta.